

Neutralelektrode für Hochfrequenz-Chirurgiegeräte

Gebrauchsanweisung

Die Neutralelektrode wurde entwickelt, um die Ableitung der Hochfrequenzwellen beim Arbeiten mit HF-Geräten auch an nicht geerdete Behandlungsstühlen und Behandlungsliegen zu ermöglichen.

Die Neutralelektrode muss so unter dem Körper des Patienten platziert werden, dass der Patient die ganze Fläche der Neutralelektrode bedeckt. Es empfiehlt sich die Platzierung in der Nähe des OP-Gebietes. Vermeiden Sie kleinflächigen Kontakt des Patienten mit der Neutralelektrode.

Der Neutralelektroden-Anschluss ist auf der Vorderseite des Gerätes.

Wichtig: Die Neutralelektroden sind für die HF-Geräte der Firma Hager & Werken zugelassen. Verwenden Sie keine Neutralelektroden von anderen Herstellern für die Hochfrequenz-Chirurgiegeräte und setzen Sie die Neutralelektroden nicht bei Fremdgeräten ein.

Die Neutralelektrode ist desinfizierbar. (keine maschinelle Desinfektion)

Neutralelektrode mit Stecker 1,5 m	REF 452 419
Neutralelektrode mit Stecker 2,5 m	REF 452 420
Neutralelektrode mit Buchse 1,5 m	REF 452 421
Neutralelektrode mit Buchse 2,5 m	REF 452 422

